

Муниципальное образование город Екатеринбург
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 441

ул. Восточная, д. 64а, г. Екатеринбург, Октябрьский район
тел. (343)350-30-90(80), E-mail: mdou441@eduekb.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ детский сад № 441

 С.И. Кузнецова

Приказ № 46/2 от «31» августа 2021 г.

Инструкция по эксплуатации 2-х секционного телескопического пандуса

Двух секционный телескопический пандус (Мега 2 ПТ1-150 и Мега 2 ПТ1-210) используется для спуска/подъема инвалидов колясок на лестнице во входной группе и на 1 этаже здания детского сада. Предназначен для установки на лестницу во входной группе и на марше лестницы 1 этажа, где установка стационарного пандуса мешает проходу пешеходов. Пандус устанавливается ответственным лицом при прибытии (убытии) инвалида, маломобильного гражданина в (из) детского сада.

Для установки пандуса необходимо:

1. Взять упаковку с пандусом в шкафу в коридоре на 1 этаже (рядом с туалетом).
2. Извлечь пандус из упаковки.
3. Взять один полз пандуса вертикально, так чтобы фиксирующая кнопка была под пальцами правой руки.
4. Нажатием на кнопку удлинить пандус до шелчка (кнопка в данном случае фиксирует длину пандуса на другом его конце).
5. То же самое проделать со вторым полз пандуса
6. Определить верхнюю и нижнюю части ползьев (концы ползьев имеют изгибы: верхняя часть -внутри, нижняя – наружу).
7. Каждый полз пандуса уложить на ступени лестничного марша, соответственно концами изогнутыми внутрь наверх, наружу – вниз (ширина между ползьями не более 50 см.), проверить устойчивость ползьев (перед этим при необходимости, освободи проход от напольных покрытий).
8. После использования ползья пандуса очистить от грязи, протереть влажной ветошью, сложить в упаковку, убрать на место.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023